

UNITEST[®]


TEST DE EMBARAZO

Instrucciones de uso:


1- Tomar una muestra de orina con el gotero y verter en el orificio sin que se exceda su capacidad.




2- Luego de 5 minutos observe el resultado.

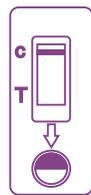

NEGATIVO

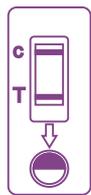

POSITIVO

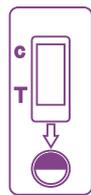

INVÁLIDO

Conservar en el sobre a una temperatura entre 2°C y 30° C.

Recomendaciones:

- Si el resultado es positivo, consultar al ginecólogo.
- Desechar todos los elementos de la prueba y dejar fuera del alcance de los niños.

“VENTA LIBRE”

LABORATORIOS GALENO S.A. – División MIAPHARMA,
Ruta 1 Mcal. Francisco Solano López, km 15,200,
San Lorenzo – Paraguay.
www.galeno.com.py

MIA
· P H A R M A ·